



ThermoFlex™-10

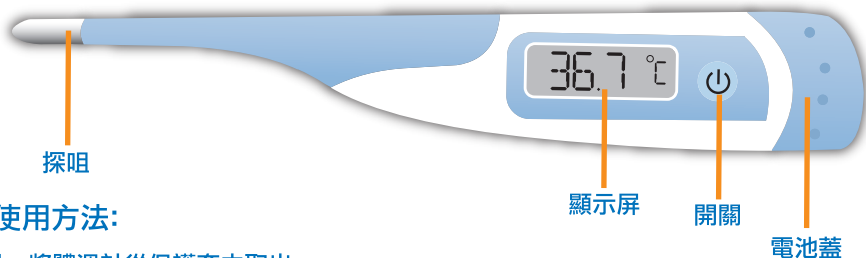

使用方法:

- 1 將體溫計從保護套中取出；
- 2 按下 ，體溫計將發出“唸”聲，並於液晶屏顯示全部訊號；
- 3 跟著顯示前一次體溫讀數約兩秒，之後顯示屏上的 $^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$) 不停閃動，表示正在量度體溫，大概需時10秒；
- 4 當達至最高體溫時， $^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$) 會停止閃動，並發出“唸—唸—唸—唸—”頻率的聲響。如體溫高於37.8°C(100°F)，聲響將會是“唸-唸-唸—唸-唸-唸—唸-唸-唸”；
- 5 取出體溫計，讀取溫度。如體溫計仍停留在口腔、肛門或腋下，讀數或會輕微上升因檢測到更高溫度；
- 6 關上電源或待1分鐘後自動關機；將體溫計放回保護套內。

口腔測溫 — 將體溫計探咀放在舌頭下，緊閉嘴巴。

肛門測溫 — 在體溫計探咀塗上潤滑膏，再將之輕輕插入肛門約1/2吋；肛探體溫較口探體溫高 0.5°C(0.9°F)。

腋下測溫 — 用乾毛巾清潔腋下，將體溫計探咀放置於腋根處，夾緊腋下；腋探體溫較口探體溫低 0.5°C(0.9°F)。

安全須知:


- 高燒或持續發燒需立刻諮詢醫生。
- 不可讓小孩獨自測量體溫並不可在量度過程中走動，以免造成危險。
- 將體溫計放在小孩不可觸及的地方，誤吞零件會造成傷害。

ThermoFlex™-10

使用提示:

- 正常體溫 — 通常37°C(98.6°F)視為正常體溫，但亦因年齡及個別人仕體質而有差距，因此36.1°C(97°F)至37.8°C(100°F)仍屬正常，需參照他們的日常體溫作比較。
- 在量度體溫前，不要飲用冷、熱的飲品，吸煙或作運動。
- 不可咬探咀或將之屈曲超過 45 度。
- 請勿將體溫計浸入任何液體中。
- 不使用時，將體溫計置於保護套中，並存放於陰涼乾爽處。
- 使用前、後，用70%酒精清潔體溫計以保清潔衛生。

故障顯示:

故障圖樣	圖解	解決方法
$\text{Hi } ^{\circ}\text{C}$ ($\text{Hi } ^{\circ}\text{F}$)	需量度的溫度高於43°C(109.4°F)	超出量度的範圍，不能測溫。
$\text{Lo } ^{\circ}\text{C}$ ($\text{Lo } ^{\circ}\text{F}$)	需量度的溫度低於32°C(89.6°F)	超出量度的範圍，不能測溫。
	低電量	請即更換電池。
$\text{--- } ^{\circ}\text{C}$ ($\text{--- } ^{\circ}\text{F}$)	量度終斷 - 如量度未完成(唸聲響號前)取出或移動體溫計，“--- °C(°F)” 會出示於屏幕並發出唸聲；	關上電源並從新啟動再作量度。
Err	操作系統故障	送回代理商檢查修理。

°C/°F 之轉換

關上電源並緊按  約五秒，之後屏幕會顯示上次之讀數及現時之單位模式，當 $^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$) 出現時再按一下選擇單位模式，選定後待 $^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$) 閃動時便可再量度體溫。

更換電池：當低電量符號 " " 出現時，便需更換電池。

- 1 拉出電池蓋，
- 2 鉗出或用尖物推出舊電池，
- 3 將新的電池(LR41)換入，注意 "+" 面向下，體溫計會即時運作；
- 4 關上電池蓋。

- ** 請勿將電池再充電
- ** 誤吞電池有危險
- ** 除更換電池外，請勿觸動零件